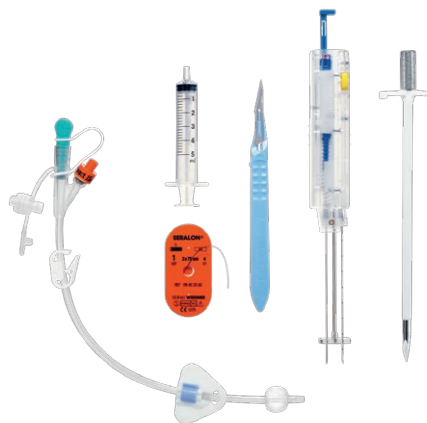


**Freka®  
Pexact II,  
15 FR**Sonda de balón de colocación  
por Gastropexia**Contenido del embalaje unitario**

- 1 Sonda Freka® Pexact II, 15 FR
- 1 Trocar con compuerta tipo "peel away"
- 1 Escalpelo
- Instrucciones de uso
- 1 Dispositivo de gastropexia
- 2 Materiales de sutura
- 1 Jeringa luer de 5 ml

**Características**

- Sonda de silicona transparente de 15 FR con 1 línea radioopaca para posibilitar el control radiológico
- Kit completo con todo lo necesario para su colocación
- Válvula de llenado lateral del balón (5 - 7,5 ml de agua estéril)
- Balón de retención interna de silicona. Se recomienda rellenar el balón con agua destilada
- Graduaciones en centímetros
- La sonda se debe cambiar transcurridos 90 días desde su colocación, por una nueva sonda de balón (ej. Freka® Gastrotube)
- Libre de látex
- Esterilizado por óxido de etileno
- Fabricado según la Directiva Europea de Productos Sanitarios: CE 0123

**Recomendaciones de uso**

Nutrición por vía enteral a largo plazo (&gt;6-8 semanas), especialmente en casos de:

- Tumores de tracto digestivo superior
- Dificultad de acceso esofágico
- Estenosis
- Varices
- Divertículos
- Quemaduras
- Radio y/o quimioterapia
- Para evitar la propagación de las células tumorales
- Cirugía de cabeza y cuello

**Método colocación sonda Freka® Pexact, 15 FR (con control endoscópico)**

- Insertar el dispositivo de gastropexia
- Introducir el hilo de sutura (a través del dispositivo de gastropexia), por el interior del lazo
- Cerrar el lazo y fijar el hilo de sutura
- Retirar el dispositivo de gastropexia y hacer un nudo
- Insertar el trocar
- Insertar la sonda de balón a través de la funda del trocar con hendidura tipo "peel away" y retirarla para finalizar la fijación de la sonda

**Presentación****Freka® Pexact II, 15 FR****Referencia****7601362****Unidad de venta****1**

La seguridad es Nutrición Emocional

**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi España, S.A.U.  
Torre Mapfre - Villa Olímpica  
C/ Marina, 16-18, planta 26Teléfono: (+34) 93 225 65 65  
E-mail: [atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com](mailto:atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com)  
[www.nutricionemocional.es](http://www.nutricionemocional.es)**Servicio de Atención al Cliente**  
 **900 53 21 11**