

| Alarma   | Símbolo | Solución  |
|--|---------|---|
| Batería descargada.  |         | Conectar la bomba a la red eléctrica.   |
| Volumen requerido alcanzado.   |         | Reiniciar/desactivar el contador de volumen.  |
| Sistema de administración vacío.   |         | La aplicación ha finalizado y/o puede reinicializarse.  |
| Sistema de administración acodado u obstruido entre el envase y la bomba.                              |         | Comprobar que no exista un acodamiento u obstrucción en el sistema de administración.   |
| Sistema de administración acodado u obstruido entre la bomba y el paciente. Sonda acodada u obstruida. |         | Comprobar que no exista un acodamiento u obstrucción en el sistema de administración. Verificar que no exista oclusión en la sonda. |
| Sistema de administración no colocado correctamente.   |         | Verifique la correcta colocación del sistema de administración.   |
| Puerta de la bomba abierta.  |         | Verifique que la puerta está correctamente cerrada.   |
| Sistema de bombeo bloqueado.   |         | Póngase en contacto con el delegado.  |
| Error del sistema.   |         | Póngase en contacto con el delegado.  |

Servicio de Atención al Cliente

900 53 21 11

Fresenius Kabi España, S.A.U.  
Torre Mapfre - Villa Olímpica  
C/ Marina, 16-18, planta 26  
Teléfono: (+34) 93 225 65 65

E-mail: [nutricionentel.es](mailto:nutricionentel.es)  
[www.nutricionemocional.es](http://www.nutricionemocional.es)

## Colocación del sistema de administración

- Desbloquear y abrir la puerta de la bomba, usando la palanca.
- Colocar la abrazadera del sistema de administración en línea con la flecha hacia abajo.
- Fijar el sistema de administración en la guía inferior, asegurándose de que está en línea recta y ligeramente estirado.
- Cerrar la puerta de la bomba, ajustándola firmemente.



## Inicio del programa



Poner en marcha la bomba de nutrición enteral pulsando la tecla durante varios segundos.



Prellenar el sistema de administración manteniendo la tecla pulsada o de forma manual.



Ajustar el flujo de administración.



En caso necesario, ajustar el volumen requerido; para activarlo/desactivarlo, pulsar ambas teclas simultáneamente.



Pulsar el botón de inicio/paro para iniciar la administración del producto.

## Otras funciones



3s → 0

Indicador de información:

- $\Sigma$  Volumen de nutrición administrado.
- $\Sigma-$  Volumen de nutrición restante.
- Para reiniciar la indicación de volumen a cero, pulsar la tecla durante 3 segundos.



Bloquear/desbloquear el teclado.



Ajustar el volumen de alarma.



Reiniciar (pulsar ambas teclas simultáneamente).

## Funcionamiento en red o con batería



### Funcionamiento en red

Con soporte de la bomba y cable de conexión a red.

### Puesta en servicio de la bomba

- Insertar la bomba en el riel del soporte.
- Enchufar el cable de red en la base de conexión a red del soporte.
- Conectar la fuente de alimentación a la red.

### Funcionamiento con batería

- Duración de la batería: **24 h.**
- Flujo: **125 ml/h.**
- La batería está cargada. 
- La batería está descargada. 

### Puesta en servicio de la bomba

La batería también se carga durante la operación con conexión a la red.