



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Freka[®] Connect ENFit[™] /ProNeo enterale ernæringsprøyer

Rengjøringsanvisning*

Rengjøringsanvisning

Freka® Connect ENFit™ /ProNeo enterale ernæringsprøyter

Freka® Connect ENFit™ / ProNeo - 1 ml / 2,5 ml / 5 ml / 10 ml / 20 ml / 60 ml / 100 ml
Freka® Connect ENFit™ / ProNeo LDT - 1 ml / 2,5 ml / 5 ml

Rengjøringsanvisningen er kun gyldig for de enterale sprøytetyperne som står oppført ovenfor og er kun beregnet til bruk av samme pasient i en ikke-klinisk setting. Ikke koble ernæringsprøyten til en enteral ernæringspumpe etter rengjøring. Gjentatt bruk av enterale ernæringsprøyter medfører ikke-sterilitet.

Det anbefales å kun bruke sprøyten opp til 96 timer av hygieniske og funksjonelle årsaker. For kritisk syke pasienter er det anbefalt å bytte sprøyte etter hver administrasjon og minst hver 24. time.

Trinn 1:

Skyll ernæringsprøyten grundig etter bruk. Ikke la rester av medikamenter og/eller ernæring bli liggende i en brukt ernæringsprøyte, da dette reduserer antall ganger produktet kan gjenbrukes.

Trinn 2:

Trekk stempelet helt ut av sprøytesylinderen. Det er ikke nødvendig å fjerne den svarte gummitetningen fra stemplet.

Trinn 3:

Rengjør forsiktig begge deler (sylinder og stempel) i rent, varmt såpevann (vaskemiddel) for å fjerne eventuelle rester fra den sist var i bruk.

Trinn 4:

Ikke rengjør sprøytekomponenter med børster, avfettingsmidler eller andre slipende materialer. Rengjøring i oppvaskmaskin anbefales IKKE.

Trinn 5:

Skyll av vaskemiddelet under rennende vann eller i en bolle med rent vann. Rist av overflødig vann.

Trinn 6:

La de enkelte komponentene lufttørke før de settes sammen igjen.

Trinn 7:

Unngå å gni de enkelte komponentene tørre med en klut, da dette reduserer gjenbruksfrekvensen av den enterale ernæringsprøyten.

Trinn 8:

Når ernæringsprøyten ikke er i bruk, skal den oppbevares på et rent, tørt sted beskyttet mot direkte sollys.

Trinn 9:

En entral ernæringsprøyte som brukes til medisiner og/eller ernæring kan brukes av en og samme pasient i opptil fire påfølgende dager.

En enteral ernæringsprøyte bør ikke brukes om igjen hvis skalaen er vanskelig å lese eller hvis stempelet er vanskelig å bevege.

Avfallshåndtering

Freka® Connect ENFit™ /ProNeo enterale ernæringsprøyter

Ved bruk til hjemmepasient kan enterale ernæringsprøyter kastes i husholdningsavfallet.

* Freka® Connect ENFit™/ProNeo enterale ernæringsprøyter er CE-merket og godkjent for engangsbruk. Gjentatt bruk etter rengjøring skjer på brukerens eget ansvar. På grunn av manglende sterilitet på det medisinske utstyret er gjentatt bruk i det kliniske miljøet og til kritisk syke pasienter utelukket.

